

COVID-19 Ag Schnelltest

vereinfachter COVID-19-Diagnosetest

FÜR GESCHULTE PERSONEN



Effektiver Schnelltest zur frühzeitigen Erkennung einer aktiven Infektion bei symptomatischen und asymptomatischen Testpersonen vor Ort. Zuverlässige Ergebnisse ohne Kreuzreaktivität mit saisonalen Coronaviren.



KOSTENGÜNSTIGER, HOCHLEISTUNGSFÄHIGER TEST FÜR DEZENTRALE ANWENDUNG



EINFACHES TESTVERFAHREN MIT DIREKTEM NASENABSTRICH FÜR EIN SICHERES ERGEBNIS



HOHE KLINISCHE SENSITIVITÄT VON 95,5% UND SPEZIFITÄT VON 100%



SEHR NIEDRIGE NACHWEISGRENZE (LOD) VON 31,5 (5 10⁰⁸) TCID 50/ML



ERMÖGLICHT INTUITIVE PROBENBEARBEITUNG MIT VORGEFÜLLTEN TESTRÖHRCHEN



SCHNELLES ERGEBNIS IN 15 MINUTEN, KEINE INSTRUMENTE ERFORDERLICH




DURCH OFFIZIELLE LISTUNG BEIM BFARM ERSTATTUNGSFÄHIGKEIT GEWÄHRLEISTET

Die COVID-19-Antigenbestimmung


Nutzen Sie den Humasis COVID-19 Ag Test, wenn Ihre Patienten einen schnellen, zuverlässigen COVID-19-Test benötigen. Liefert Ergebnisse in Laborqualität vor Ort in 15 Minuten

TESTVERFAHREN

VORBEREITUNG DER PROBE

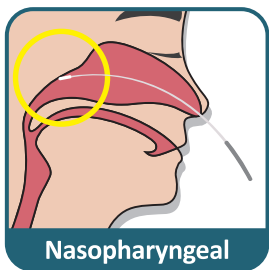


ODER


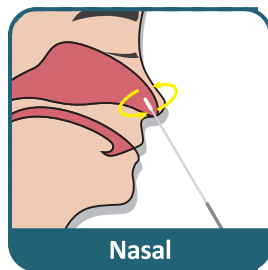


Führen Sie den Abstrichtupfer 1-2 Zentimeter in das linke Nasenloch ein und zirkeln Sie ihn 5 Mal oder mindestens 15 Sekunden in kreisenden Bewegungen fest gegen die Nasenwand. Führen Sie im Anschluss dasselbe im rechten Nasenloch durch.

DURCHFÜHRUNG DES TESTS

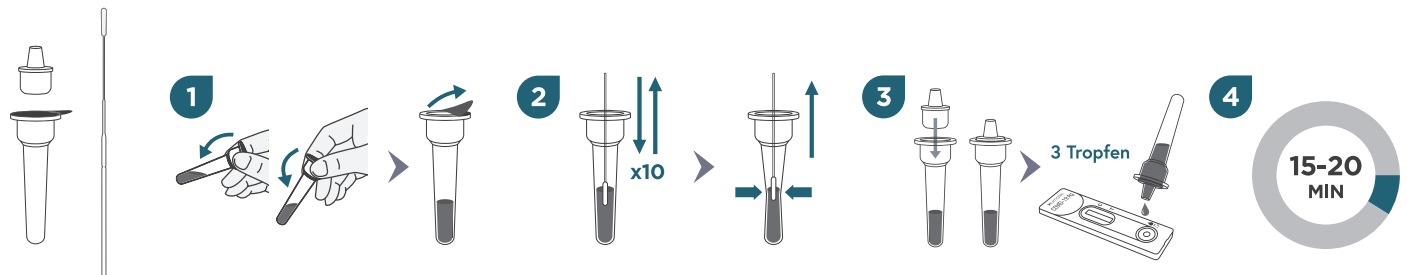

INTERPRETATION DES ERGEBNISSES

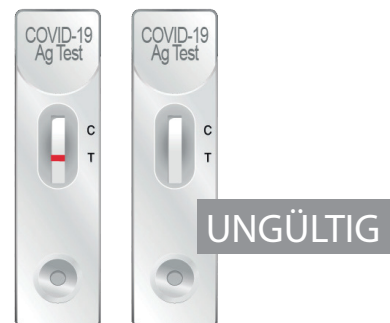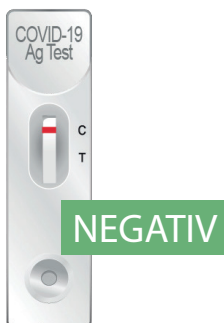

zugelassen und gelistet beim

 Bundesinstitut
für Arzneimittel
und Medizinprodukte

evaluiert und gelistet beim


Paul-Ehrlich-Institut


erhältlich auf

www.bieglosan.shop

PRODUKTDDETAILS

PRODUKT	Humasis Covid-19 Ag Test
ARTIKEL NR.	108100010001
PZN	16904896
BFARM TEST ID	AT083/20
DIMDI	Dok. Nr. 00095487
VERPACKUNG	25 Tests pro Box – 24 Boxen pro Umkarton
PROBEN	Nasopharyngealer Abstrich oder einfacher Nasenmuschel Abstrich
LAGERUNG	2-30°C
HALTBARKEIT	18 Monate

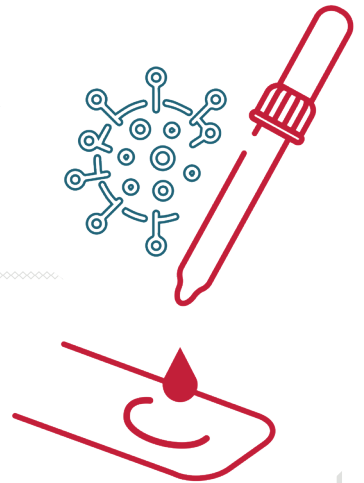

erkennt zuverlässig auch alle aufgetretenen Virusmutationen

HERSTELLER

Humasis Co., Ltd
 Rm. 503, Shinwon Vision Tower,
 Jeonpa-ro 88, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14042, Korea
Tel: +82 31 478 8546
Fax: +82 31 478 8586
E-Mail: question@humasis.com

EU REP.

MT Promedt Consulting GmbH
 Altenhofstr. 80
 D-66386
 St. Ingbert / Germany
Tel: +49 6894 85 10 20
Fax: +49 6894 85 10 21
E-Mail: info@mt-procons.com

*Dem Käufer ist bekannt, dass die verkauften Antigen Schnelltests nur von medizinisch geschultem Personal angewendet oder angeleitet werden dürfen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Ergebnisse der Schnelltests. Durch Aufgabe einer Bestellung bestätigt der Käufer, dass er sicherstellt, dass die verkauften Schnelltests nur durch ausreichend qualifizierte Personen überwacht werden.

www.bieglosan.de
info@bieglosan.de
 +49 40 401130000



BIEGLO GmbH
 Bahrenfelder Straße 242
 22765 Hamburg, Germany